



MANUAL DE USUARIO

ÍNDICE / Body Massager

Introducción	04
Principio de funcionamiento	04
Beneficios	05
Aplicaciones	06
Contraindicaciones	06
Instrucciones de armado	07
Instrucciones de uso	09
Accesorios incluidos	10
Datos técnicos	10
Solución de problemas	11

No enciende el equipo

No hay emisión

BODY MASSAGER

INTRODUCCIÓN

La vibroterapia es una técnica avanzada para ofrecer un tratamiento activo para la piel y los músculos. Funciona con un sistema que genera presión por medio de un vibrador rotativo. Por medio de las vibraciones mecánicas en las diferentes partes del cuerpo se puede aplicar un tratamiento terapéutico.

El equipo cuenta con un cabezal adaptado para generar vibraciones de baja frecuencia que produce una onda mecánica al mismo tiempo. Esta vibración se expande a lo largo de las diferentes capas de la piel con mayor o menor profundidad según la frecuencia que se requiera. Cuanto más baja sea la frecuencia, más profundo actúa sobre la piel. Los mayores niveles de frecuencia (hasta 40 Hz), actúan de una manera más superficial. La operación se basa en un cabezal oscilante en el cual se adaptan diferentes aplicadores para cada tratamiento.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El equipo Body Massager realiza un masaje corporal, que permite dar relajación al cuerpo y reducir medidas. Está equipado con 5 cabezales que se usan para diferentes tratamientos.

Cabezal 1

Aplicador redondo de silicón con las puntas largas para aplicar masaje en gran profundidad. Se recomienda utilizarlo a baja velocidad (entre los niveles 1 y 2). Sin embargo, para estimular la epidermis, el equipo debe ser utilizado a una velocidad máxima.

Cabezal 2

Aplicador redondo de silicón con varias puntas cortas, que trabaja en la profundidad de la epidermis. Apto para la estimulación, exfoliación, vasodilatación y revitalización de tratamientos de masaje. Se utiliza en la espalda, los muslos y los glúteos. Se recomienda utilizar infrarrojos en el nivel 5. Se usan lociones y aceites para facilitar la penetración de producto y lograr un mayor nivel de reducción de medidas. Se aplica en tratamientos para deportistas antes de hacer ejercicio.

Cabezal 3

Suave y versátil aplicador de esponja circular apto para las partes sensibles del cuerpo. Se aplica un masaje suave y ligero. Se utiliza antes y después de iniciar tratamientos para preparar los tejidos y liberar la tensión. La velocidad es recomendada entre los niveles 3 y 5. Debe usarse una fibra de papel para cubrir el aplicador durante la sesión.

Cabezal 4

Aplicador cuadrado con 4 bolas medianas. Ideal para el masaje en los hombros, la espalda, los muslos y los glúteos. Los niveles de velocidad recomendables: 1, 2 y 3.

Cabezal 5

Aplicador de esponja adecuado para trabajar hombros, cuello, espalda, piernas y rodillas. Es muy apropiado para tratamientos de relajación para combatir el estrés diario. Es necesario el uso de una fibra o papel desechable para cubrir el aplicador durante la sesión. Los niveles de velocidad recomendables: 2, 3 y 4.

BENEFICIOS

- Estimula la proliferación celular
- Elimina las imperfecciones cutáneas
- Proporciona una mayor firmeza de la piel
- Contribuye a una rápida regeneración cutánea
- Mejora la oxigenación celular
- Elimina las toxinas y proporciona una mayor luminosidad a la piel
- Mejora el drenaje linfático
- Proporciona un bienestar y sensación relajante
- Reduce el exceso de grasa

APLICACIONES

- Celulitis
- Fatiga
- Retención de líquidos
- Tonificación muscular
- Dolor osteoarticular
- Estrés y cansancio
- Drenaje linfático
- Problemas musculares
- Ejercicio pasivo en músculos paralizados








CONTRAINDICACIONES

No se debe realizar en los siguientes casos:


- Las personas que padecen problemas cardíacos
- Personas con marcapasos
- Enfermedades infecciosas y enfermedades inflamatorias
- Fracturas óseas
- Heridas abiertas
- Embarazo
- Problemas de presión alta y baja
- Venas varicosas, tromboflebitis y linfangitis
- Problemas cardiovasculares, flebitis o trombosis
- Diabetes
- Epilepsia
- Eczemas

El tiempo recomendado para una sesión oscila entre 30 y 60 minutos según el tipo de tratamiento. El profesional tendrá que planificar cada tratamiento y los intervalos correspondientes entre sesiones, dependiendo de las necesidades del paciente y la función de masaje.

INSTRUCCIONES DE ARMADO

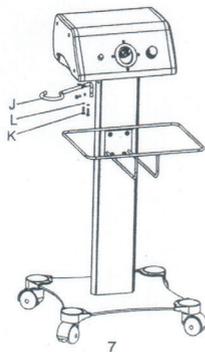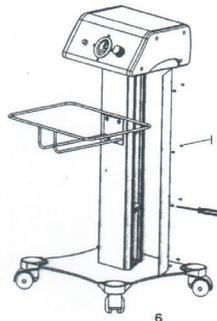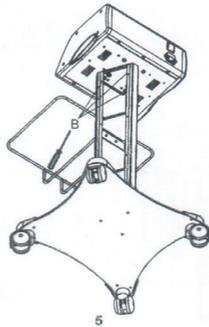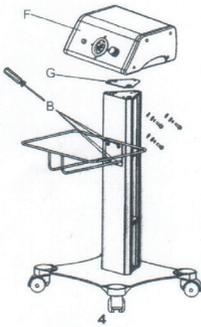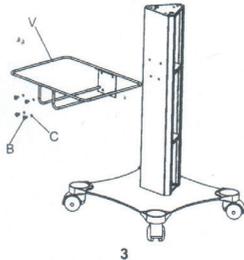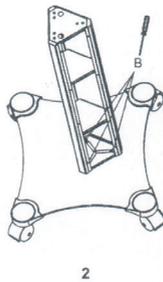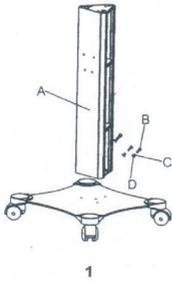


INSTRUCCIONES DE ARMADO

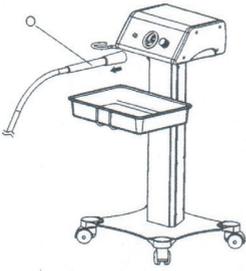


9




10

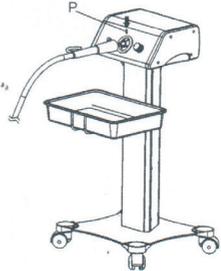


11

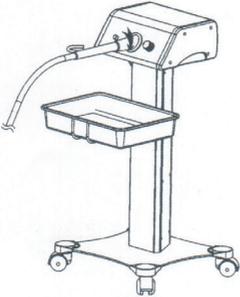

12

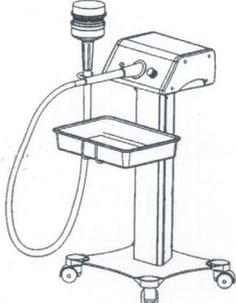

13

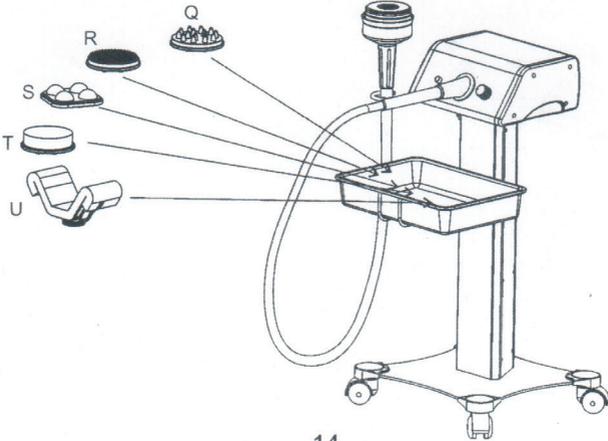


14

INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Conectará el cable de línea a la energía eléctrica.
- 2) Presionara el botón en modo ON, para encender el equipo.



- 3) Deberá ajustar los niveles de trabajo:
 - **Nivel 1** : Es utilizado para zonas pequeñas del cuerpo como : nudillos, cuello, planta de los pies.
 - **Nivel 2** : Se utiliza para drenar el tejido adiposo y eliminar arrugas.
 - **Nivel 3 - 5** : Son utilizados para hacer masaje y relajar músculos.

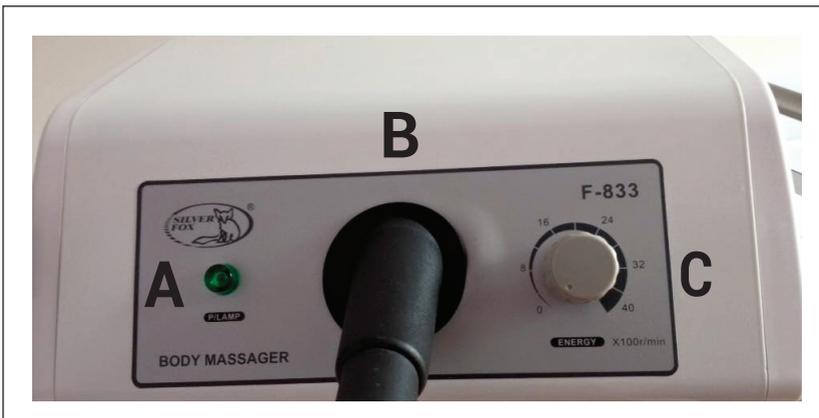

- A) Luz de encendido
B) Puerto de salida
C) Regulador de velocidad

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable de línea para alimentación
- Soporte de ruedas
- 5 aplicadores
- Bandeja
- Estructura de soporte (bandeja)

DATOS TÉCNICOS

- Voltaje de entrada: 110 - 120 Volts
- Frecuencia de trabajo: 50 Hz / 60 Hz
- Potencia de consumo: 100 Watts
- Velocidad de rotación: 0-400 rev/min

SOLUCIÓN

de problemas con nuestro equipo

¡NO ENCIENDE EL EQUIPO!

- 1) Revisar que el cable de línea se encuentre bien conectado en sus dos extremos.
- 2) Revisar que el switch de encendido encienda y se encuentre en la posición de **RESET**.
- 3) Revisar el fusible.

¡NO HAY EMISIÓN!

- 1) Revisar que el aplicador sea el adecuado y que se encuentre perfectamente conectado.
- 2) Revise que el cable del aplicador no se encuentre deteriorado, con el uso; el cable comienza a ser rígido a lo largo del mismo y en algún extremo se observa demasiado flácido.
- 3) Realice la misma prueba con algún otro aplicador para descartar la falla del mismo.

NUESTRA EMPRESA



Bioingeniería Estética les da la más cordial bienvenida y les invita a disfrutar de nuestra amplia gama en aparatología Médica - Estética y Terapéutica, somos una empresa 100% mexicana dedicada al diseño, producción, servicio y comercialización de nuestros equipos.

Contamos con personal altamente capacitado en asesoría técnica de nuestros equipos, asesoría de comercialización de tu negocio y la productividad del mismo. Nuestros asesores técnicos cuentan con más de **20 años dentro del mercado**, innovándose cada día a pasos agigantados, los cuales son marcados por los avances científicos y tecnológicos de nuestra actualidad.

Con esta vasta experiencia en comercialización, con la que contamos; te invitamos a participar con nosotros, para poder presentarte la mejor alternativa actual de tu negocio, con ello tendrás mayor certeza en realizar la compra del equipo que te generara ingresos y te hará crecer de una manera segura y progresiva, nosotros lo haremos recíprocamente contigo.

Agradecemos enormemente tu preferencia y deseamos poder seguir sirviéndote en un futuro no muy lejano, si requieres cualquier asesoría y/o consulta técnica no dudes en llamarnos estaremos para servirte en el horario de 9:00 a 18:00 hrs. de Lunes a Viernes.

Te recordamos leer cuidadosamente nuestra póliza de garantía, así podremos brindarte el mejor servicio posible en todo momento. Departamento de ventas, departamento de producción, departamento de mantenimiento y departamento de garantías; agradecen tu preferencia y te brindan todo su apoyo en caso de requerir cualquiera de nuestros servicios, con la mayor eficiencia posible.

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA S.A DE C. V.



Yautepec #154 Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 Del. Cuauhtémoc
MÉXICO, D.F.

01 (55) 6267 9000

www.bioingenieriaestetica.com
comprasbioest@hotmail.com

¡FELICIDADES!

GRACIAS
POR TU COMPRA

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA S.A. DE C.V.

Agradece tu preferencia

Equipo IMPORTADO bajo las más estrictas normas de calidad y desarrollado con tecnología de vanguardia por:



BIOINGENIERÍA ESTÉTICA S.A DE C. V.

Yautepec #154 Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 Del. Cuauhtémoc
MÉXICO, D.F.

01 (55) 6267 8333

www.bioingenieriaestetica.com